

# Tip alignment

2017.05.04




# 原因

---

- 在儀器首次操作TT4或其他會使用到稀釋槽的檢驗前會需要做校正，整個過程約5分鐘，結束後機器會自動進入初始化約15分鐘。


# 步驟-1

於螢幕上點選右上角Tools，進到tools畫面後點選右下腳 "Align Tip/Diluent Drawer"

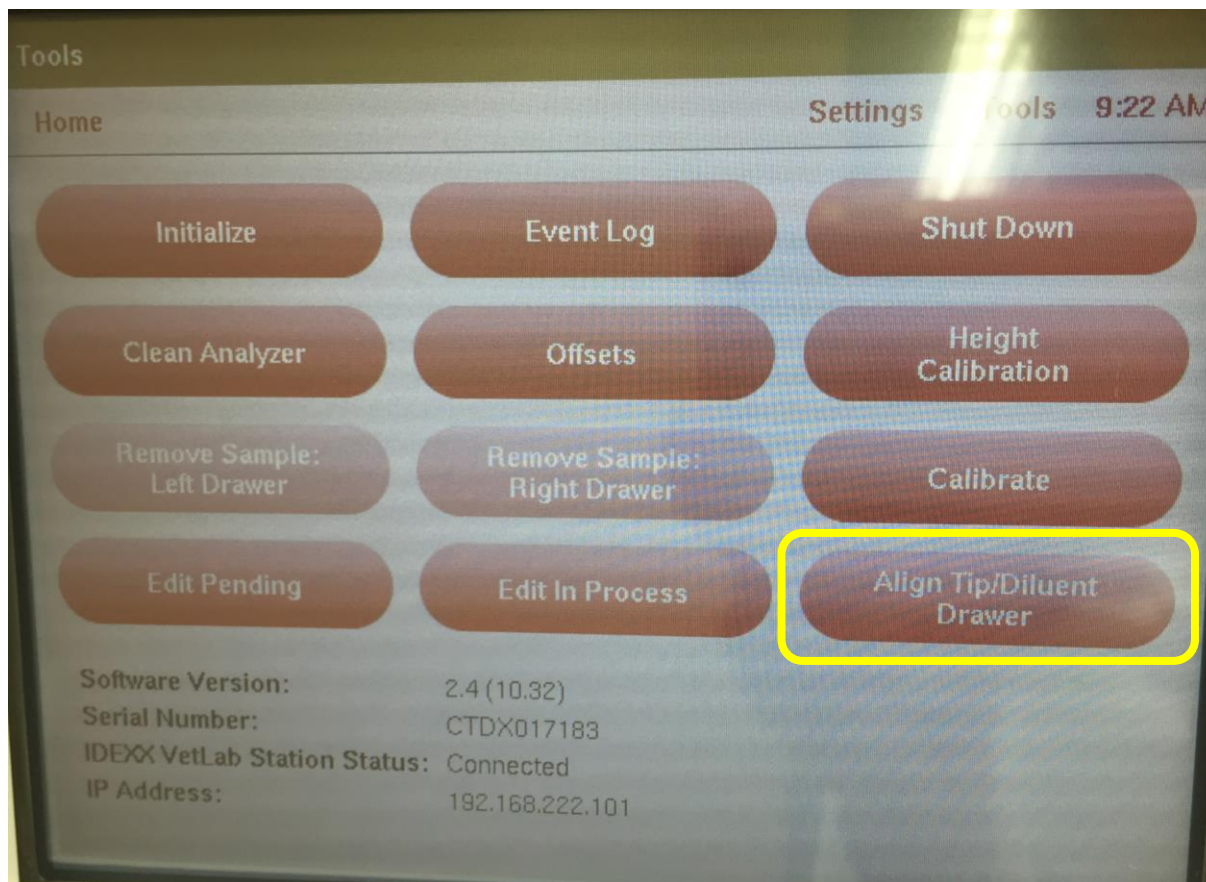


## 步驟-2

依照步驟將tip槽填滿，移除其他檢體杯保持抽屜只有tip，若有明顯髒污也請先擦拭乾淨，關上抽屜後即可點選螢幕右下角OK。

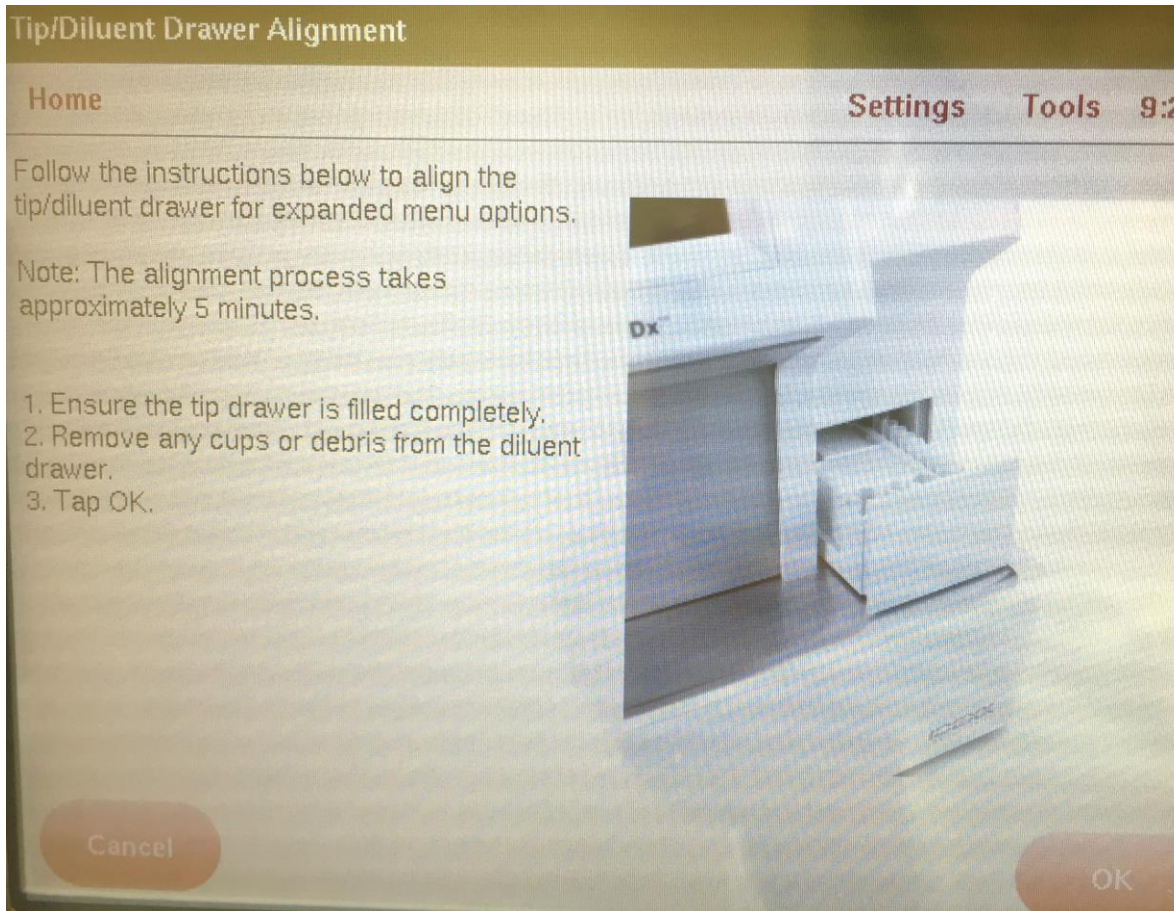


## 步驟-3

開始校正時機器會進入此畫面，過程中請勿打開稀釋槽抽屜及坩

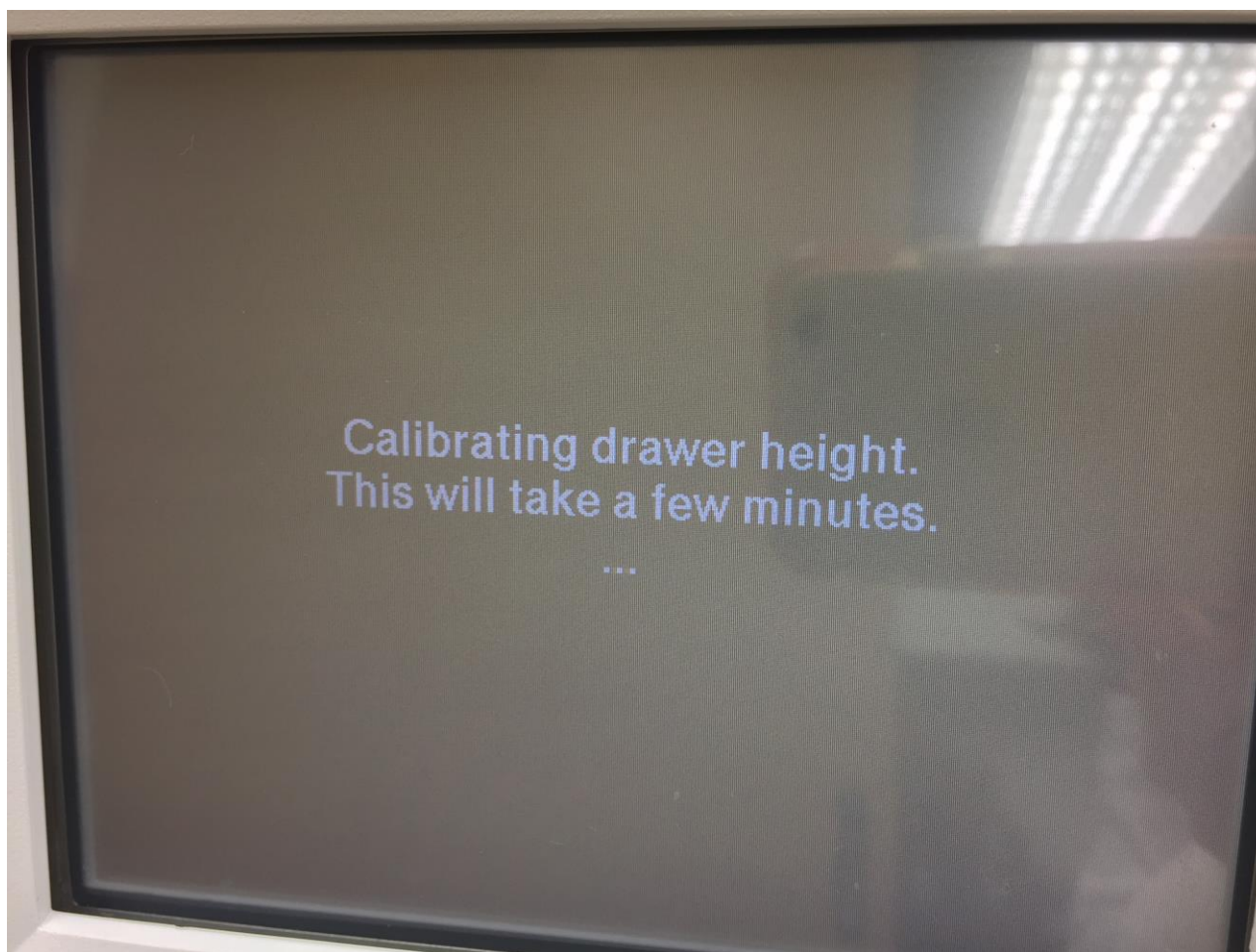

## 步驟-4


- 校正成功後會出現此對話框，按OK即可讓機器進入初始化

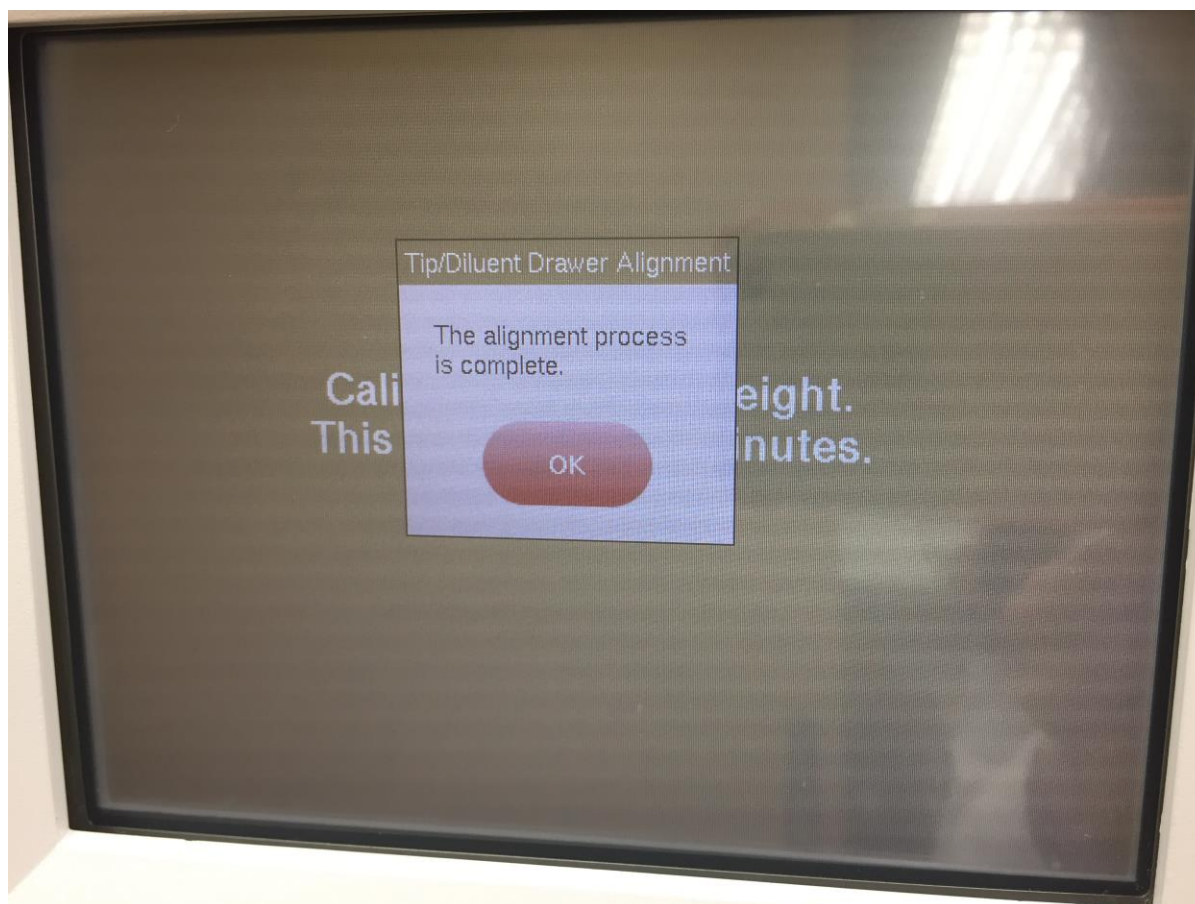

# 校正失敗

## 故障排除步驟-1


- 若校正過程出現此對話框內容 “The alignment process was not successful....” 請依後續步驟進行

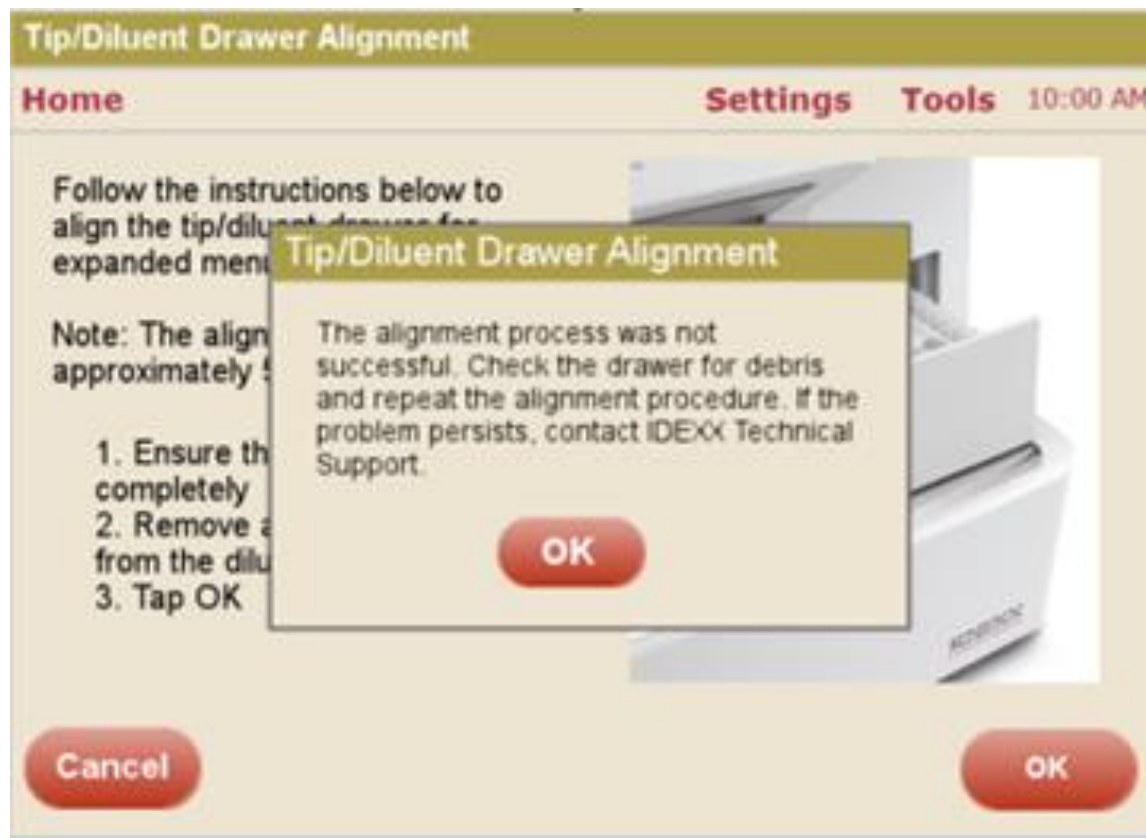



## 故障排除步驟-2

- 開啟catalyst Dx前門  
(開門方式影片: <https://youtu.be/yis1Dz-95rk> )
- 準備酒精棉片及拭鏡紙
- 要清潔的部分位於開門的右手邊

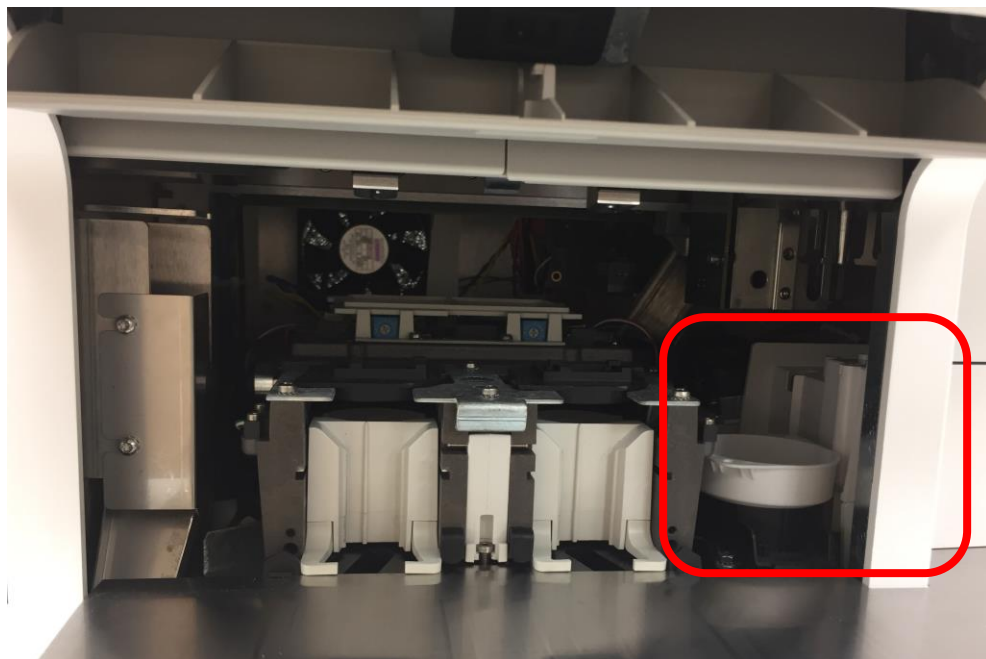

## 故障排除步驟-3

- 打開檢體槽的門，使用酒精棉片清潔TIP seal pad (如箭頭所示)，確認表面沒有任何干掉的血漿或髒汙，再使用拭淨紙將酒精擦乾。
- 關上前門，等待15分鐘的初始化後，重新點選Tools>Align Tip/Diluent drawer >補滿Tip後點選OK。
- 若持續無法完成此程序請連絡愛德士技術服務專線0800-291-018按1。



**IDEXX**