

## IDEXX VetTest Chemistry Analyzer 獸醫專用生化分析儀操作流程表

### Slide Calibration Data Error

#### 試劑片校正資料錯誤

發生原因：操作軟體沒有試劑片的校正曲線資料

最常發生狀況：

3. 試劑片已經或快過期.
4. 軟體版本未更新或太新.

掃讀試劑片條碼時, 螢幕先顯示：

Empty used slide container

when ready: Press E

- 把廢片盒內使用過的試劑片倒掉.
- 再按 “E”

然後螢幕會再顯示：

Calibration data error.

Reload with new slide lot.

Check software version.

解決操作步驟：

- 取出退到廢片盒的試劑片, 紀錄試劑片上印的項目和取得一個可以使用的校正曲線代號, 再把條碼塗黑.
- 把試劑片推回 VT 內.
- VT 會馬上去掃讀條碼, 螢幕會出現：  
Slide Bar code failure. Note the chemistry and curve number on the slide and reload slide.
- 按 “E” -> 試劑片退到廢片盒出來.
- 把此試劑片再推回 VT 內.
- VT 會再馬上去掃讀條碼. 螢幕顯示生化項目的代號和以下訊息：

ALB 9 .....	(白蛋白 代號 9)
ALK 65 .....	(鹼性磷酸酶 代號 65)
ALT 62 .....	(丙胺酸轉胺酶 代號 62)
Enter chemistry code number for the slide	
inserted and press E:	(輸入已推入的試劑片項目的代號, 再按 E)
Use C to correct entry.	(修改輸入資料, 按 C)

→ (例如是 ALT, 其代號就是 62) 輸入 62, 然後按 E

Enter curve number for the current slide and press E:	(輸入目前試劑片上校正曲線代號再按 E)
Use C to correct entry.	(修改輸入資料, 按 C)

→ (例如是 16) 輸入 16, 然後按 E

螢幕會再顯示你輸入的資料	
Chemistry: ALT	(生化項目: ALT)
Curve number: 16	(校正曲線代碼:16)
Press E if correct	(如果正確按 E)
Press C to redo	(如果要重輸按 C)

→ 按 E

Machine Reading barcodes
儀器會再判讀其他試劑片

Equip Probe	(裝備分注器)
Remove Probe	(拿出分注器)
Insert new tip on probe	(把新的滴管裝到分注器上)
Push tip on firmly	(推入滴管到分注器上)
Replace probe	(把分注器放回原位)
When ready: press E	(操作完按 E)

→ 裝上滴管後把分注器放回原位, 再按 E

↓ 以下檢體吸取就照正常操作執行.