

# Improper Tube Type

2017.01.25



# 原因

---

- VetAutoread 光學無法檢測到毛細管上兩條綠線的螢光

# 故障排除

# 使用錯誤的毛細管

- 確認毛細管後方兩條線為綠線，  
若為兩條紅線則為愛德士不支援的毛細管

# 確認檢體品質

- 確認檢體量

- 吸取檢體時確認有到黑線
- 離心後液面在兩條螢光綠線中間，液面不可以碰觸到綠線

- 確認檢體品質

- 操作時有將毛細管轉動30-60秒使染劑作用完全
- 離心後浮標在正確位置，分層也良好
- 毛細管外觀血跡和指紋有擦拭乾淨





請醫師將一次OK的毛細管上下都用塞子蓋好(防止蒸散)備用

麻煩醫師有空時，將一開始OK的管子連續上機十次，清除不好的紀錄

確認檢體品質(如前頁敘述)、重新離心或重新製做一個新的檢體，上機重做

將OK的管子重新上機至少兩次以上

再將剛剛失敗的管子重新上機

請醫師再觀察並注意檢體製備

請醫師再觀察並注意檢體製備

**RESET**  
by  
customer

沒有，今天其他管子都OK

沒有，這是今天第一支檢體

是的，今天每一支檢體都這樣


其他檢體有一樣的狀況嗎？

# RESET AutoReader – Improper Tube Type

在 Insert QBC Dog/Cat/Horse/Bovine Tube 畫面下



↓  
同時按 ▼ + Mode  
↓

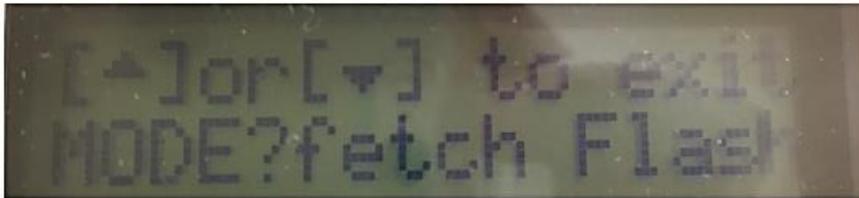

↓  
按 Mode  
↓  
再按 Mode  
↓

直到 Mode?後面出現 tube?? 如下圖



↓  
按 Next  
↓  
畫面顯示 Tube OK  
↓

重設完成

按 ▲ 回到 insert QBC \_\_\_\_ tube · 重新上機

在SFDC上若是經過客戶重設請在標題打上  
Improper Tube Type – Reset by customer

**IDEXX**