

Rotation error

2017.01.26



原因

- 常見於在 “Insert Cal Rod” 情況下放入檢體管

故障排除

1. 確認選擇模式



請勿在此畫面放入檢體管，按Mode選取其他模式




此畫面出現上面兩種 (單機操作/經整合系統下指令) 時才能放入檢體管
(按Mode 切換其他物種如Cat/Horse/Bovine)

2. 確認Autoreader的檢驗資訊-非單機操作

- 確認Autoreader (AR)的圖示有出現在VT或是IVLS等連線系統上
 - 沒有：請確認連線
 - 有：取出檢體管，清除連線系統上的檢驗資訊，按mode到insert Cal Rod 放入校正棒通過校正後，建新的檢驗，確認檢驗資訊有出現在AR上再重新跑檢體

與VT有正確連線時會在螢幕上看到AR圖示

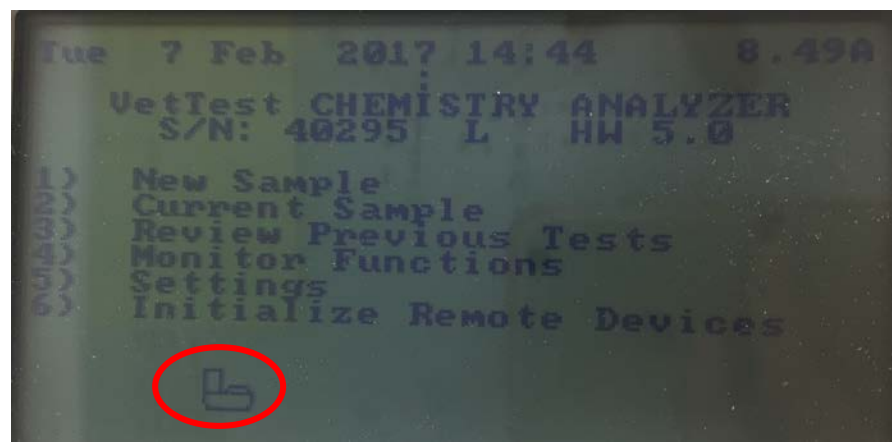

3. 確認檢體管放置

- 檢視檢體放置是否水平
- 重新放置若仍無法水平請重新啟動AR
- 重啟AR後仍無法水平，請聯繫技術服務專線

IDEXX