



## Kit 條碼無法自動讀取

[定量檢測 \(TT4, Cortisol, BA\)](#)

[速拿普 \(非定量檢測\)](#)

## 速拿普 (非定量檢測)

儀器若無法自動讀取條碼將出現下圖之提示

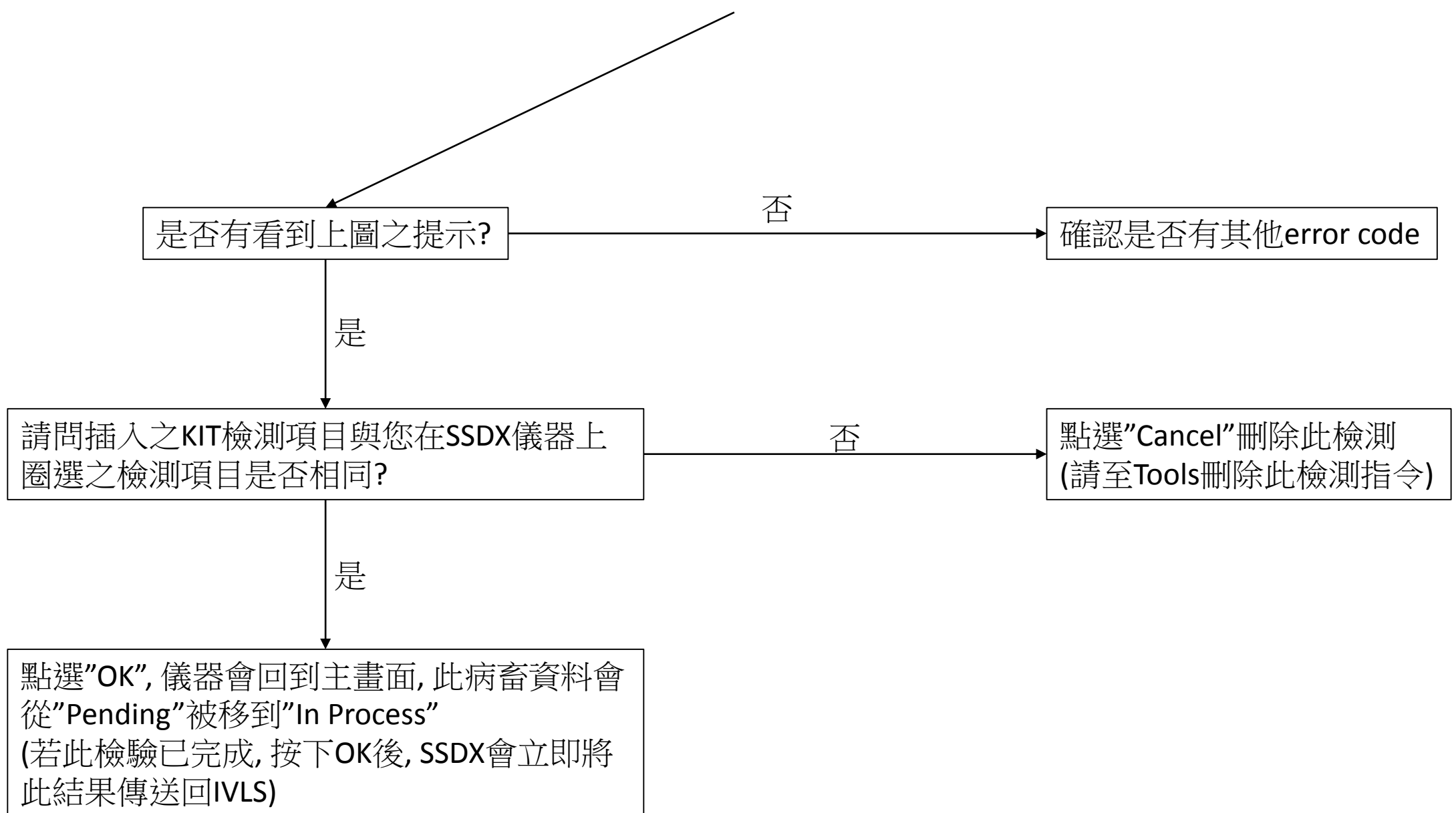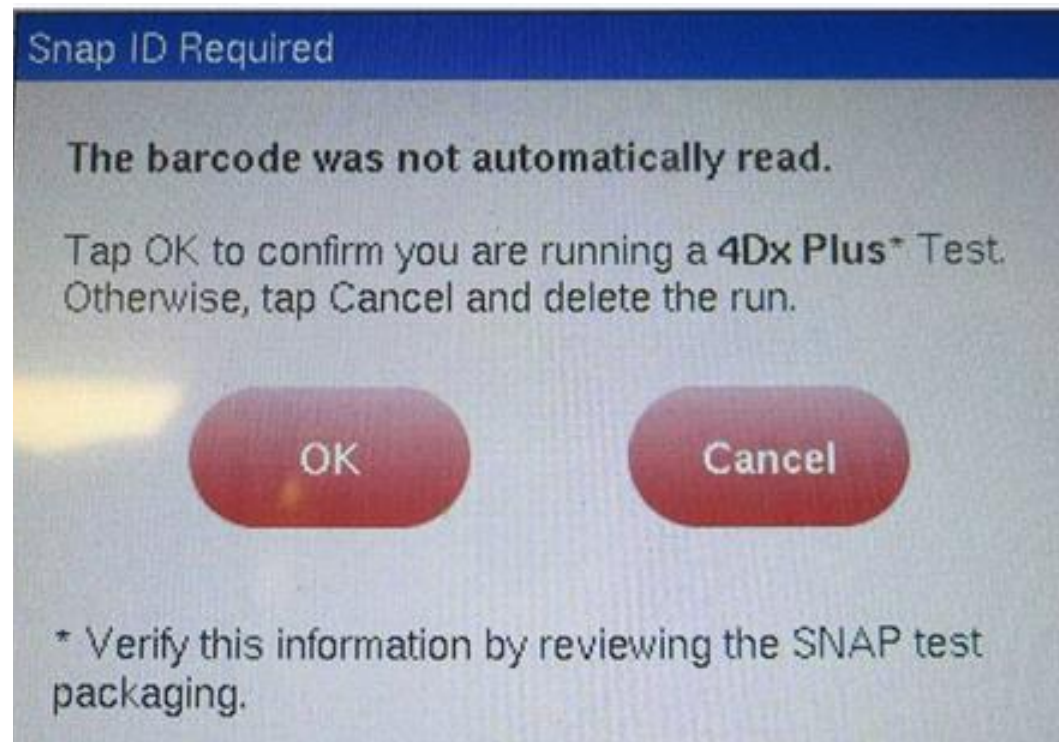

# 定量檢測 (TT4, Cortisol, BA)

確認目前使用的軟體版本為最新版

使否有收到barcode prompt的提示?

否

確認是否有其他error code

是

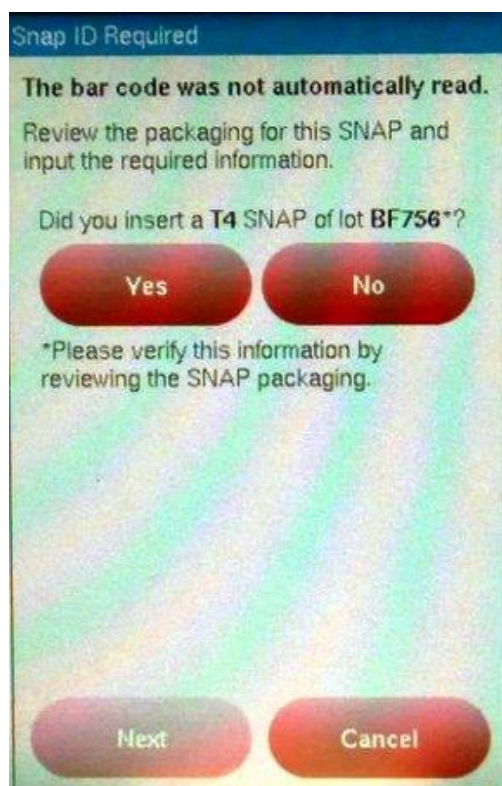


Figure 1

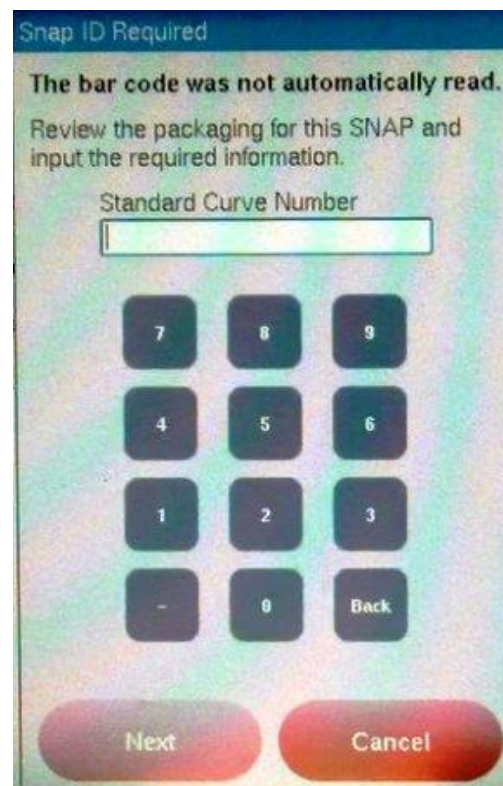


Figure 2

若得到figure 1的提示, 請確認lot是否與耗材上顯示的lot相同?

否

點選“NO”, 儀器會跳至 Figure 2的畫面

是

請點選“Yes”並點選“Next”, 儀器會回到主畫面, 此病畜資料會從“Pending”被移到“In Process” (若此檢驗已完成, 按下OK後, SSDX會立即將此結果傳送回IVLS)

若得到Figure 2的提示, 請將包裝袋上的 Standard Curve Number輸入後按“Next”儀器會回到主畫面, 此病畜資料會從“Pending”被移到“In Process” (若此檢驗已完成, 按下OK後, SSDX會立即將此結果傳送回IVLS)  
**注意:輸入錯誤時請按“Back”消除錯誤, 若按到“Cancel”則表是取消此檢測,此檢測必須重新上機並使用新的耗材**