

關機並重新啟動 IDEXX 儀器

如果要在關閉整個診所的情況下關機並重新啟動所有 IDEXX 儀器，請遵照以下步驟。如果仍有問題，請聯絡 IDEXX 客戶與技術支援部門。

IDEXX 儀器	關機步驟	重新開機步驟
Catalyst Dx* 化學分析儀	<ol style="list-style-type: none">1. 輕觸 Catalyst Dx 小螢幕上的Tools。2. 輕觸Shut down，然後輕觸YES確認您要關閉分析儀。3. 當分析儀指示可以關閉電源時，請按下分析儀背面的電源開關，關閉分析儀的電源。	<ol style="list-style-type: none">1. 確認 IDEXX VetLab Station 已重新啟動。2. 按下分析儀背面的電源開關。分析儀可能需要 15 到 25 分鐘暖機。3. 出現提示時，解除警報並清空及更換廢棄物抽屜。4. 一旦 Catalyst Dx 主頁螢幕上「正在初始化」的狀態訊息消失，便可開始使用分析儀。
Catalyst One* 化學分析儀	<ol style="list-style-type: none">1. 按住方形的啟動按鈕，直到按鈕上方的 LED 燈熄滅。2. 斷開電源線電源。	<ol style="list-style-type: none">1. 確認 IDEXX VetLab Station 已重新啟動。2. 將分析儀連接電源。3. 出現提示時，解除警報並清空及更換廢棄物抽屜。4. 一旦分析儀上的 LED 指示燈和 IDEXX VetLab Station 上的 Catalyst One 圖示變為綠色，便可開始使用儀器。
Coag Dx* 分析儀	按住 開始 鍵 4 秒關閉分析儀。	<ol style="list-style-type: none">1. 如果已連接 IDEXX VetLab Station，請確認其已重新啟動。2. 按住開始鍵。出現以下情況可以開始使用儀器：<ul style="list-style-type: none">• 出現「開始在 IDEXX VetLab Station 上分析」（適用於已連接 IDEXX VetLab Station 的分析儀）。• 「插入檢體匣」（適用於未連接 IDEXX VetLab Station 的分析儀）。

IDEXX 儀器／系統	關機步驟	重新開機步驟
Procyte One 血液學分析儀	<p>重要提示：此儀器設計可持續保持開機狀態，無須手動關機，儀器在未使用一段時間會自動進入低電量模式。若還是有關機需求，可參考以下步驟</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 常按儀器上啓動開關，直到指示燈閃紅燈後放開 2. 拔除儀器上電源線 	<p>重要提示：若關機<1周，請於儀器>診斷模式>執行系統沖洗 若關機1-2周，請於儀器>診斷模式>執行預備試劑</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確認 IDEXX VetLab Station 已重新啓動。 2. 將分析儀連接電源。 3. 一旦分析儀上的 LED 指示燈和 IDEXX VetLab Station 上的 Procyte One 圖示變為綠色，便可開始使用儀器。
IDEXX VetLab* Station	<p>重要提示：應在關閉連接的儀器後，IDEXX VetLab Station 才能關機。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 輕觸 IDEXX VetLab Station 主畫面上的 。出現確認訊息。 2. 輕觸關機。 	<p>重要提示：在重新啓動連接的儀器前，應先重新啓動 IDEXX VetLab Station。</p> <p>按下 IDEXX VetLab Station 電腦上的電源按鈕。</p>
SNAP Pro* 分析儀	<p>按住電源按鈕 3 秒，當您聽到嗶聲時鬆開。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果已連接 IDEXX VetLab Station，請確認其已重新啓動。 2. 按住電源按鈕，直到聽到嗶聲。
VetStat* 電解質及血液氣體分析儀	<p>直接關閉電源開關。</p>	<p>直接開啟電源開關。</p>
IDEXX VetLab* UA* 分析儀	<p>使用分析儀背面的電源開關關閉分析儀。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如果已連接 IDEXX VetLab Station，請確認其已重新啓動。 2. 如果尚未連接電源，請將電源線連接分析儀背面的交流變壓器和適當的電源。 3. 利用分析儀背面的電源開關啟動分析儀。 4. 一旦 IDEXX VetLab Station 主畫面上的 UA 圖示變為就緒（綠色），便可開始使用分析儀。

ProCyte Dx* 血液學分析儀

重要提示：如果您計劃關閉分析儀，建議於連假期間至少開啟分析儀1次讓分析儀沖洗試劑管線，請按照以下步驟操作。否則，請保持分析儀在待機模式。分析儀處於待機模式超過 1 週可能會損壞分析儀。

關機

IVLS 點選儀器→左列選擇 Procyte Dx→ 點選” Turn Off ProCyte Dx 關閉 ProCyte Dx” ，出現 Turn Off ProCyte Dx 對話框→點選” OK” ，IPU 會自動關機(需等待約 2 分鐘) →當關機程序執行完畢，分析儀會發出警示音，關 Procyte 分析儀右側電源開關。(此時亦可重啟 IVLS)

開機

IVLS 主機電腦到主畫面後 → 確認 Procyte 圖示為離線  → 按 IPU 電源

鍵 → 圖示由  轉  後 → 開 Procyte 析儀右側電源開關。
為確保 IPU/Procyte 連線正常，請務必以以上流程開啟 Procyte



於SediVue Dx* Urine
Sediment Analyzer
(尿沉渣分析儀)

1. 輕觸 IDEXX VetLab Station 主畫面上的 **SediVue Dx** 圖示。
2. 輕觸**關閉 SediVue Dx**。
3. 出現提示時，選擇關閉（而不是重新啟動）分析儀。

1. 輕觸 IDEXX VetLab Station 主畫面上的 **SediVue Dx** 圖示。
2. 輕觸**啟動 SediVue Dx**。