





Cassette Misseat 1




原因

- 試劑片並未妥當的放好
- 放入使用過的試劑片
- 檢驗模式時放入SRC試劑片而非一般試劑片

試劑片轉軸

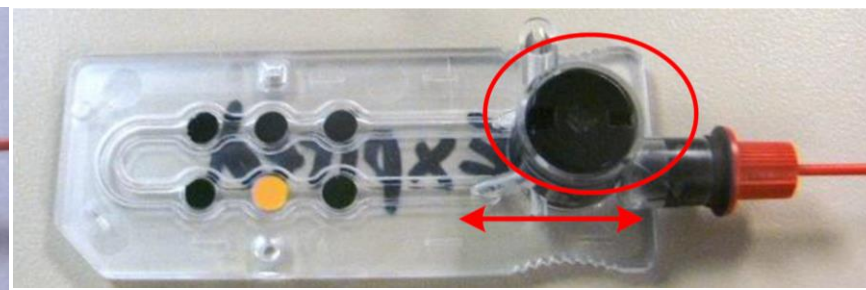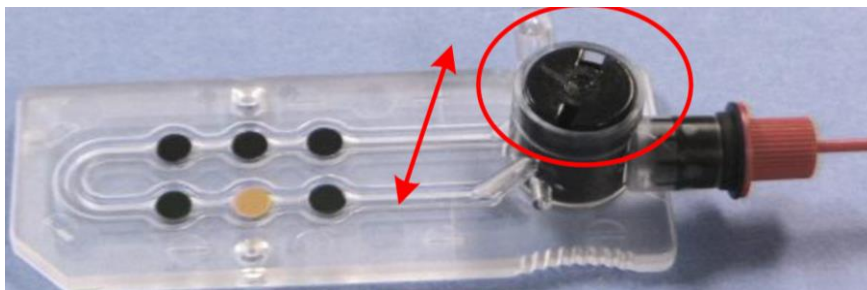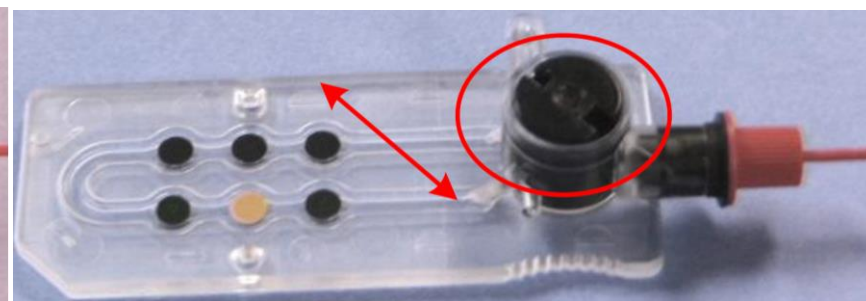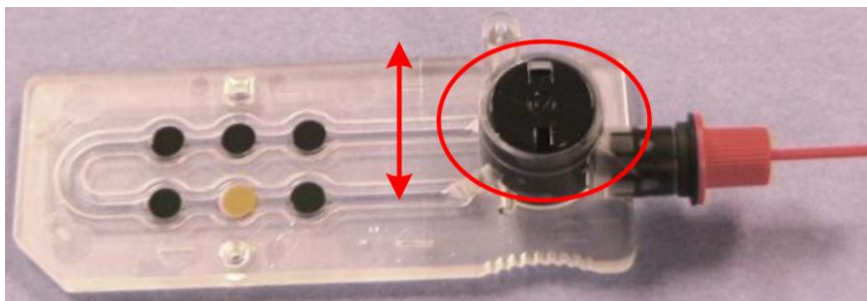


試劑片轉軸

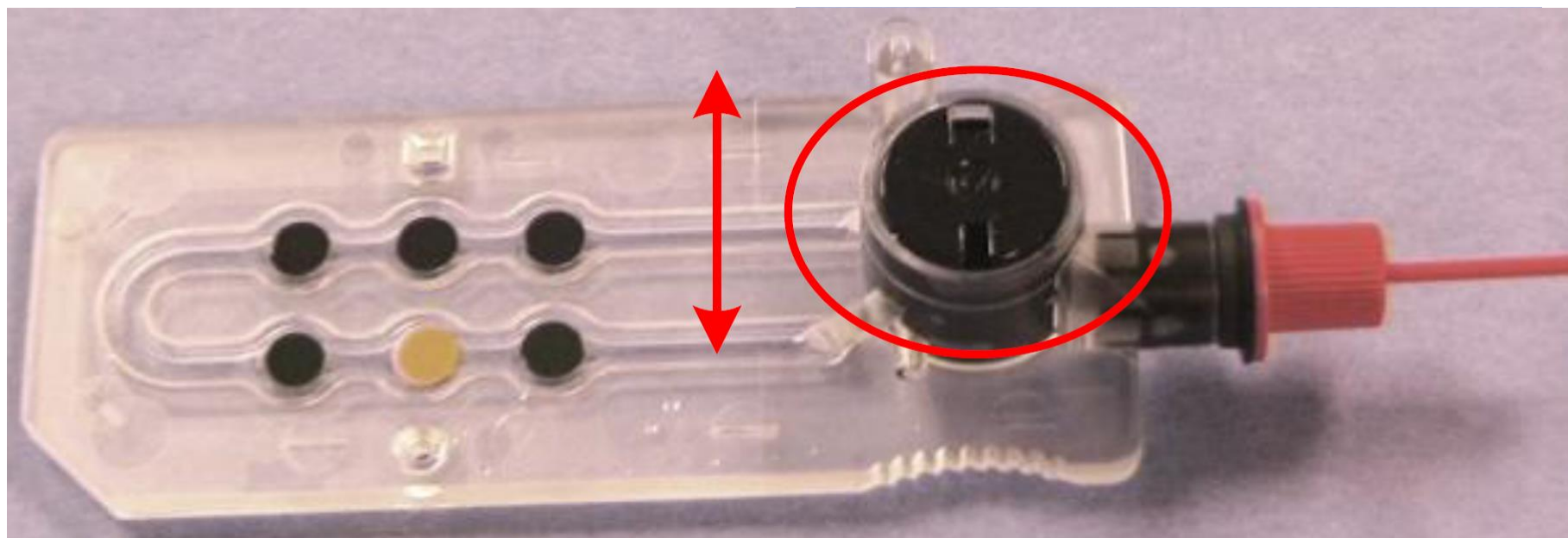


全新的試劑片

試劑片轉軸

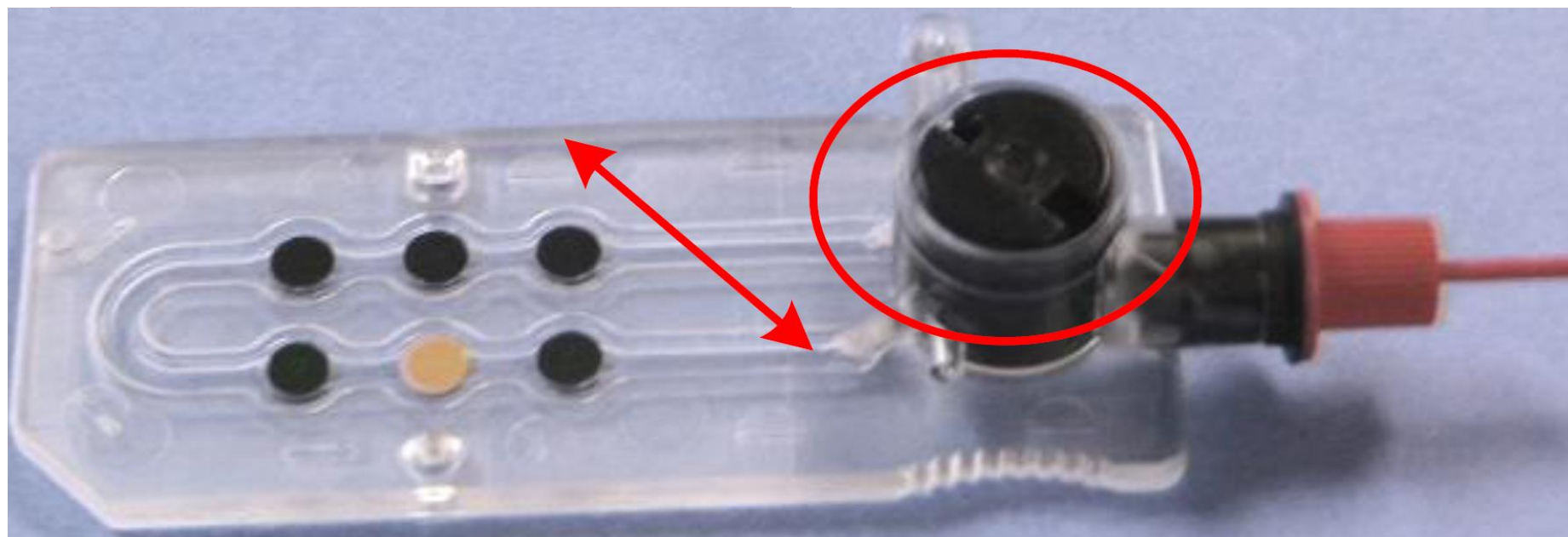


使用過的試劑片

試劑片轉軸

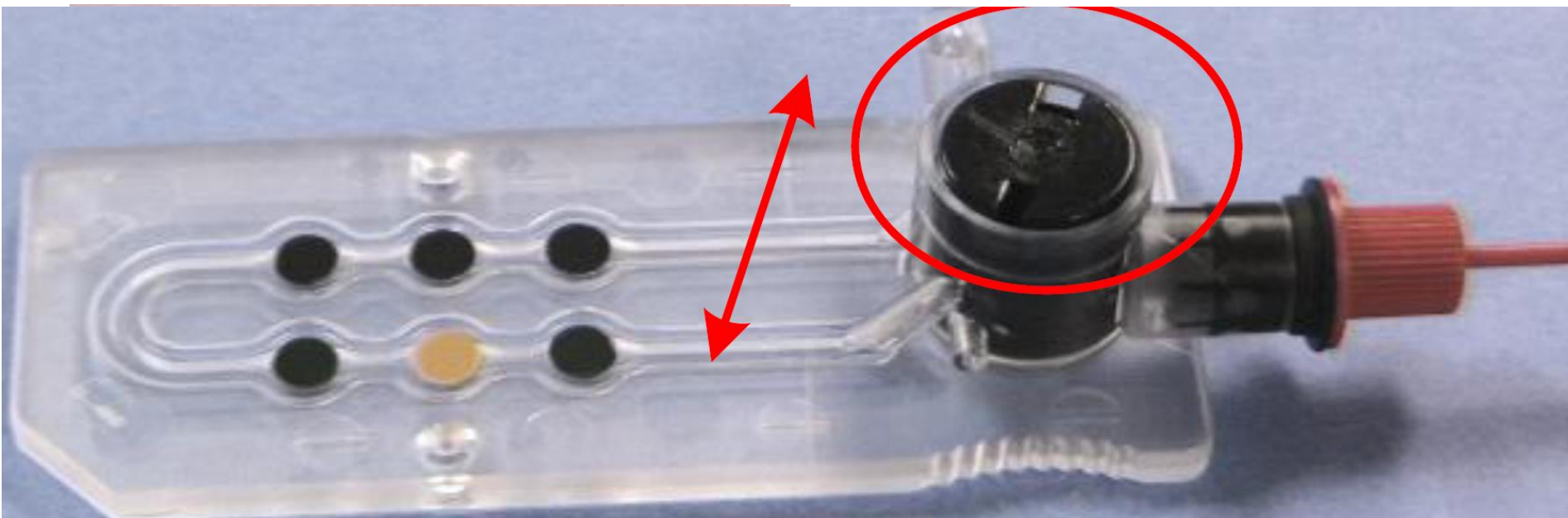

校正過的試劑片

試劑片轉軸

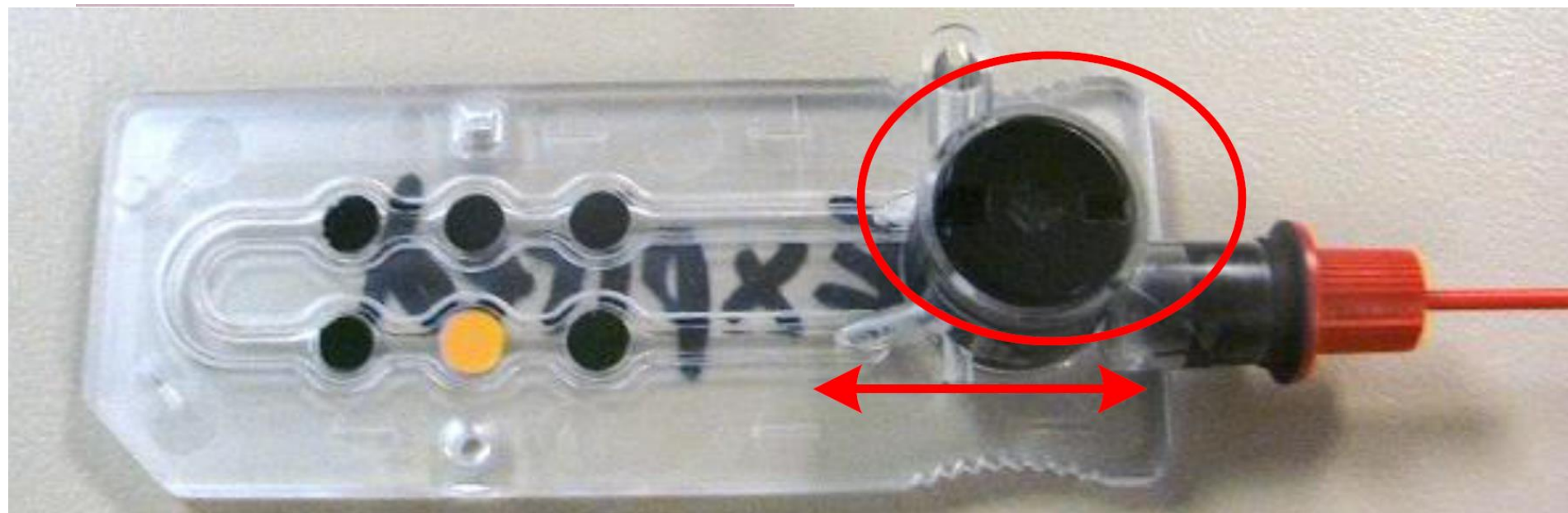

校正失敗的試劑片

故障排除

- 如確定試劑片轉軸方向為未使用的試劑片，打開SMC上蓋將試劑片重新取出後再放置穩固，再按Cancel
- 若是使用到錯誤的試劑片，按Cancel後，取出試劑片並丟棄；拆封一個新的試劑片上機。

若是此訊息在使用不同試劑片仍然持續出現，請關閉機器的電源，等待30秒後重新開啟。開機完成後，再使用新的試劑片上機測試。

IDEXX