

Cassette Misseat 2



原理

- 在校正時，當反應槽的光線閘無法感應到試劑片中的液體通過時，就會出現這個錯誤訊息

原因

- 試劑片外有汙損
- 反應槽髒汙
- 泵浦管路老舊或沒有作用
- 反應槽氣體進出通道受阻
- 光學部分原因

故障排除

試劑片外有汙損

- 按Cancel，移除並丟棄反應槽中試劑片。開啟一個新的試劑片，並確實的使用乾燥且無棉絮的布(試鏡紙)擦拭試劑片再上機

若是此訊息在使用不同試劑片仍然持續出現，請關閉機器的電源，等待30秒後重新開啟。開機完成後，再使用新的試劑片上機測試。

反應槽髒汙

- 打開反應槽上蓋，使用沾上些許酒精的無塵紙清理光學儀和反應槽上蓋內側，請用棉花棒清理反應槽細部



氣體進出通道問題檢測

- 關閉儀器，打開紙匣上蓋，移除蠕動式泵浦
- 準備抽滿空氣的針筒(移除針頭或加上細嘴如圖)
- 打開反應槽，找到圖上所示氣體進出口，
清除外觀可見髒汙
- 將1ml針筒開口整個附蓋住氣體進出閥，
或是將尖嘴放入氣體體進出閥
- 輕柔的將空氣注入
- 接著檢查漏氣，用手指附蓋原本泵浦下方兩個氣
閥較靠近前面的那一個
- 向後抽氣，應該要感覺到阻力；
向前推也應該要感受到阻力



IDEXX