

無法感應上蓋關閉

放入試劑片後，確認已蓋緊測試槽上蓋，畫面仍顯示Please close cover



可能原因

- 感應器髒了、卡住或是損壞
- 試劑片 感應器校正數值偏移

清潔SMC感應器



- 關閉VetStat
- 打開檢體測試槽上蓋，
尋找感應器位置
(畫面紅色圈選處)

- 以壓縮空氣清潔上蓋關節處及感應器位置(如圖所指)上的毛髮等碎屑
- 以70%酒精棉清潔測試槽的上蓋及承載處
- 清潔完開啟VetStat




更改CASSETTE DETECT UPPER LIMIT



在首頁點選 **System Manager**



接著在system點選 **Diagnostics**

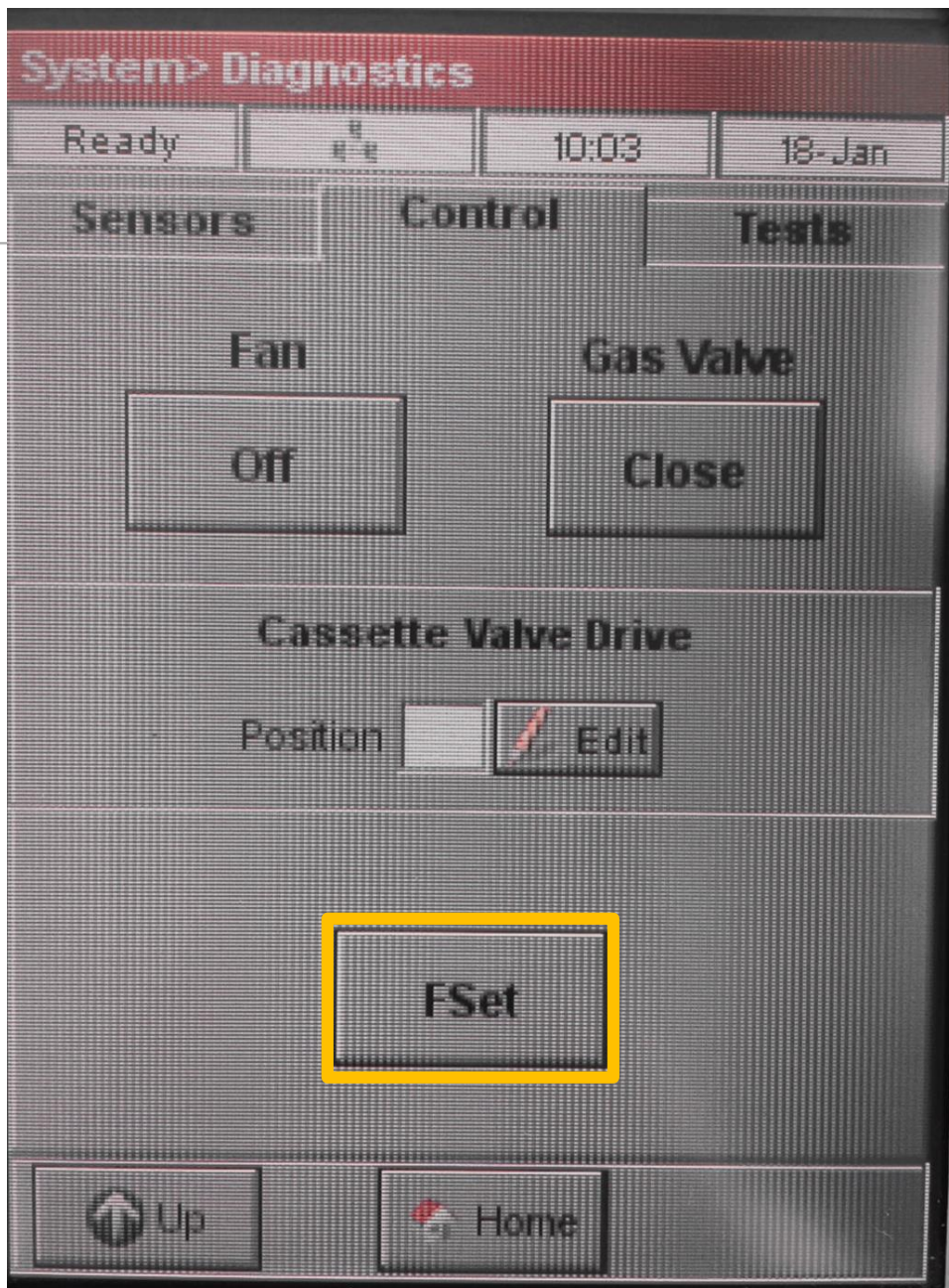


接著在control頁面點選 **FSet**

Enter FSet Password

7

8

9

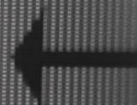

4

5

6

1

2

3

0

Cancel

OK

輸入密碼 **5482**

System> Diagnostic> FSet

Ready 10:05 18-Jan

Instrument 2 Page 2 of 5


Cassette Detect Low Limit:	267	Edit
Cassette Detect Upper Limit:	2166	Edit
Cassette Detect Low Offset:	500.0	Edit
Cassette Up Factor:	0.8	Edit
Cassette Valve Home Offset:	340	Edit
Filter Correction - PHR:	160	Edit
Filter Correction - PCR:	75	Edit
Gas O PSI:	500	Edit
Gas 140 PSI:	3696	Edit

Cancel Save Next

Up Home

在第二頁(使用Next到下一頁)的
Cassette Detect Upper Limit 點擊Edit，將數字減200
輸入
如圖 $2166 - 200 = 1966$ ，進入編輯請輸入1966。

確認試劑片偵測數值

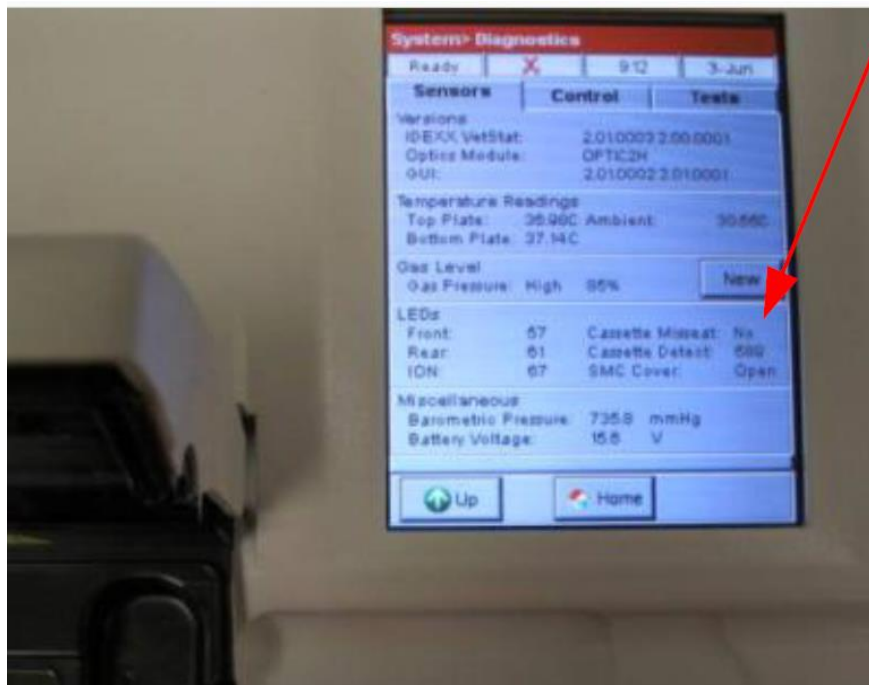

- 經由System Manager> Diagnostics> Sensors> LEDs
- 打開上蓋
- 記錄上蓋**開啟**且**沒有**放置試劑片時 Cassette Detect Value為“**數值1**”
- 放入一個**新的**試劑片，關閉上蓋
- 記錄放入試劑片後，關閉上蓋的 Cassette Detect Value為“**數值2**”
- 按HOME鍵回到首頁

System> Diagnostic> FSet

Ready 10:05 18-Jan

Instrument 2 Page 2 of 5

Cassette Detect Low Limit:	267	Edit
Cassette Detect Upper Limit:	2166	Edit
Cassette Detect Low Offset:	500.0	Edit
Cassette Up Factor:	0.8	Edit
Cassette Valve Home Offset:	340	Edit
Filter Correction - PHR:	160	Edit
Filter Correction - PCR:	75	Edit
Gas O PSI:	500	Edit
Gas 140 PSI:	3696	Edit

- System Manager> Diagnostics> control 頁面點選 **FSet** > 輸入密碼 5482> 到第二頁(使用Next到下一頁)
- Cassette Detect Low Limit :
點擊Edit，將數值1填入
- Cassette Detect Upper Limit :
點擊Edit，將數值2填入
- 按Save儲存，按Home回首頁
- 列印FSet確認更改已完成

IDEXX