


Reagent Appears Disconnected-試劑組斷開

2017.04.24






原因

- Procyte氣泡感應器偵測到管路中有空氣。可能原因有：
 - 試劑過少
 - 試劑組上蓋放置不適當或破損。
 - 管線被折到或破損
 - 試劑盒放置高於Procyte

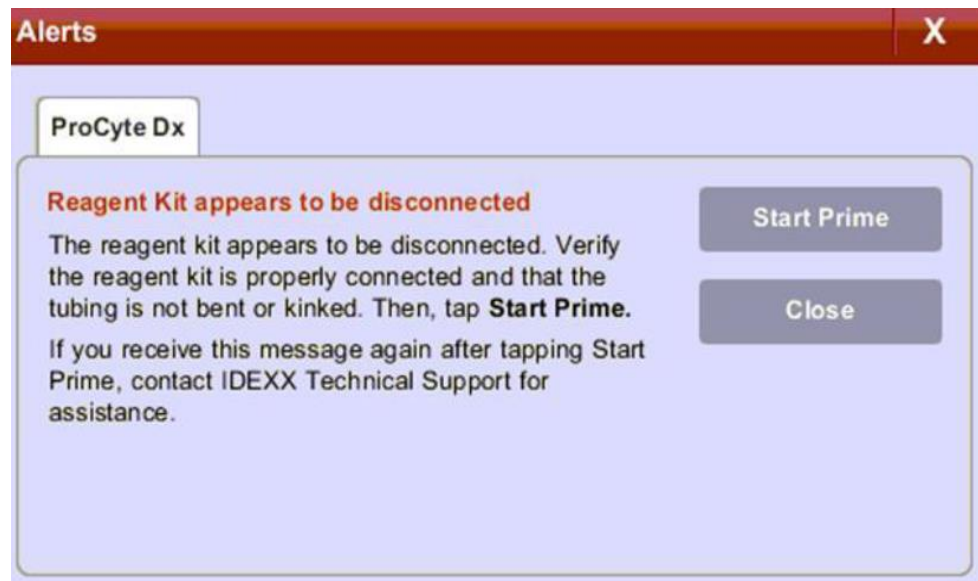

故障排除-1

- 依照警示點選**Prime**沖洗管路，若未解決請繼續下一步。
- 檢查試劑上蓋是否放置正確，錐形塞水平密合於三小罐。

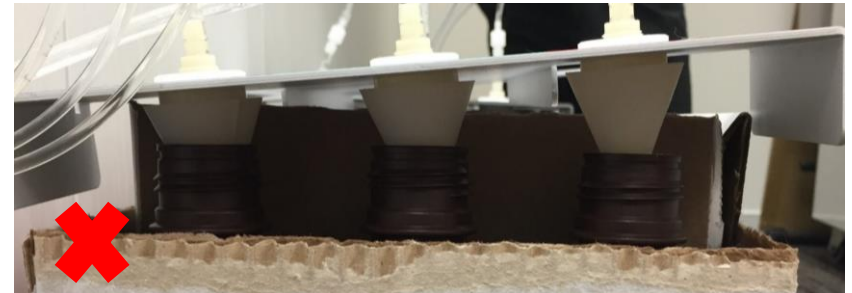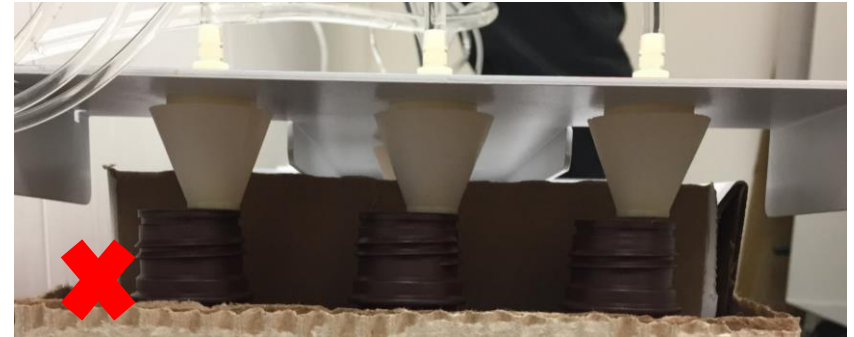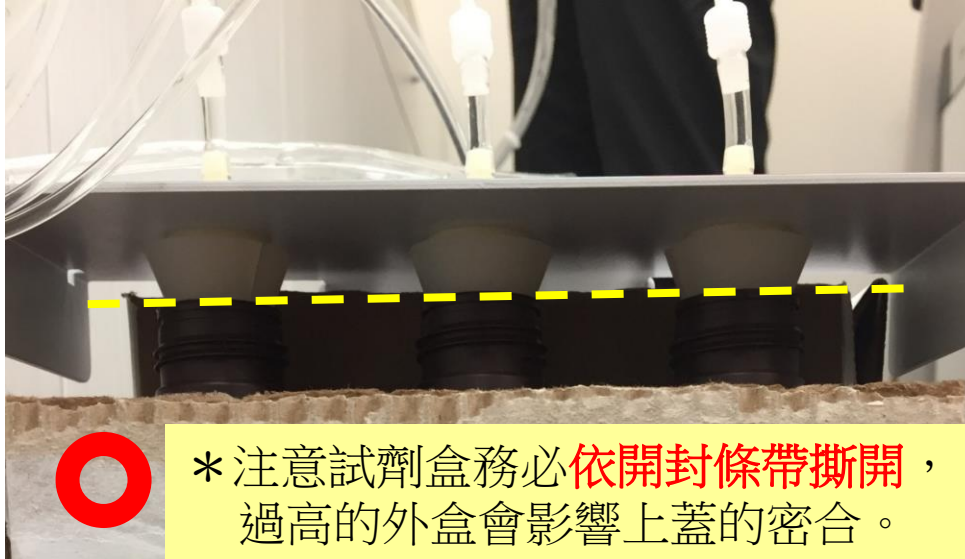

故障排除-2

- 檢查試劑套組(I-IV)有無任何一瓶容量過少
 - 若有容量過少或空的請更換一組試劑盒後點選**Prime**沖洗管路。
 - 若所有試劑瓶皆明顯有**15ml**以上容量，請檢查**Procyte**儀器後方到試劑套組中間管線有無折到或破損。
- 若試劑盒擺放位置高於**PDX**儀器，請將試劑盒移動到低於儀器的位置再點選**Prime**沖洗管路。
- 若以上皆確認沒有錯誤，也更換過試劑盒沖洗後還是一樣的警示，請撥打技術服務專線。

IDEXX