

Reagent kit/Stain pack empty-試劑/染劑空了

2017.06.07





Recent Test Results

Alerts



ProCytex Dx

Reagent Kit empty.

Tap Change Reagent to continue.

Change Reagent

Close

Reagent kit = 試劑套組
Stain pack = 染劑套組

點選change reagent更換試劑/染劑



Ready



VetTest

Ready



VetStat

Ready



SNAPshot Dx

Ready



SNAP Pro

Ready



SNAP



近期檢驗結果

通知



ProCyt Dx

染劑空了

點選 更換染劑 鍵以繼續



Reagent kit = 試劑套組

Stain pack = 染劑套組

更換染劑

關閉

點選change reagent更換試劑/染劑

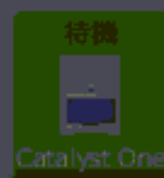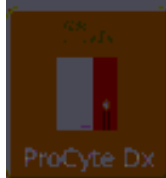



Scan or enter a reagent kit bar code:

Continue

Cancel

確定輸入法為英文，將游標點至輸入框，
掃描試劑盒上第二條(較長)條碼。



1234567890

QWERTYUPL←

ASDFGHJK

ZXCVBNM

Scan or enter a reagent kit bar code:

TATZ

Continue

Cancel



此狀況(或出現亂碼)為輸入法未改成英文輸入法，請ctrl+space改為英文輸入法後再次刷條碼





Scan or enter a reagent kit bar code:

TATZ4PX3ZN0F4Z0YCFJWHK



Continue

Cancel

輸入完成後，確認螢幕所示條碼與盒上相同，點選下一步





Scan or enter a reagent kit bar code:

Continue

Cancel


此時您可以更換新的試劑/染劑。更換完成後點選OK。

****注意連接阜標示的顏色要與試劑/染劑包裝貼紙標示顏色相同****


ProCyte Dx Change Reagent Kit

Connect reagent kit, then tap OK to complete the update.

OK

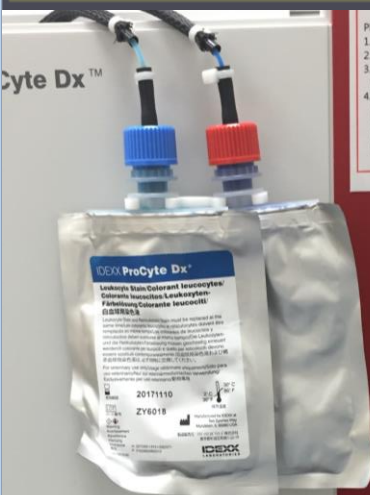

POC 操作注意事項
1. 繪圖需求: EDTA抗凝小瓶
2. 每月保養: 以5%酒精清洗
3. 若出現試劑成功圖示, 則
完, 若已用完請進行更換
4. 若儀器顯示錯誤 (如: PO
關機, 或IPU電池沒電) 或
→ IVDX主機電腦斷機(軟
關機) 請立即關閉儀器主
由原廠維修人員立即開機POC

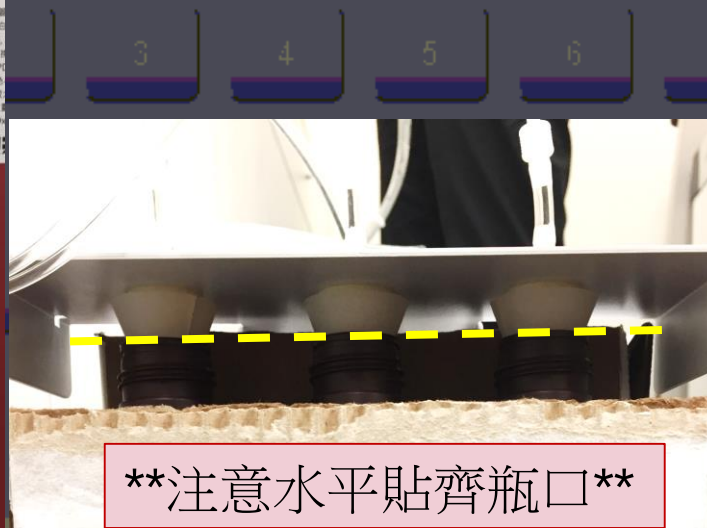

****注意水平貼齊瓶口****



IDEXX